



farda

FANAVARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY

Ostomy Product Guide



BAO-Health®






farda

FATAVARY ROOZ DARMAN ARYA COMPANY

Making a Difference in the Journey of Life

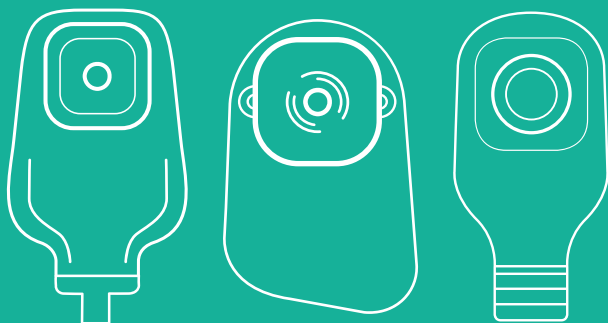

Ostomy Care Products

فهرست

- ۴ استوما چیست
- ۵ ویژگی های کیسه های BAO-Health
- ۶ انواع کیسه ها
- ۷ لوازم جانبی
- ۹ نکات عمومی مراقبت از استوما
- ۱۰ استوما و رژیم غذایی
- ۱۰ لیست محصولات



استوما چیست؟

دهانه و مجرایبی است که با عمل جراحی بر روی سطح شکم ایجاد می شود و از طریق آن مدفوع و ادرار، بجای خروج از مقعد یا دستگاه ادراری، از مجرای ایجاد شده، خارج می شود.





استوما انواع گوناگونی دارد:

- کلستومی
- ایلئوستومی
- یورستومی

کلستومی: نوعی عمل جراحی است که در آن ایجاد استوما بر روی قسمتی از روده ی بزرگ صورت می گیرد. کلستومی معمولاً در سمت چپ شکم و پایین ناف قرار دارد.

ایلئوستومی: نوعی عمل جراحی است که در انتهای روده باریک صورت می گیرد و محل آن معمولاً در سمت راست شکم و پایین ناف قرار دارد.

یورستومی: استومایی است که با عمل جراحی بر روی شکم ایجاد می شود تا ادرار از طریق آن خارج شود.

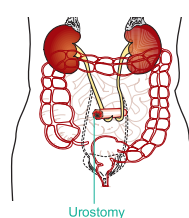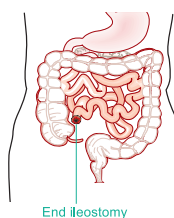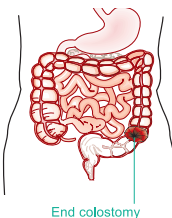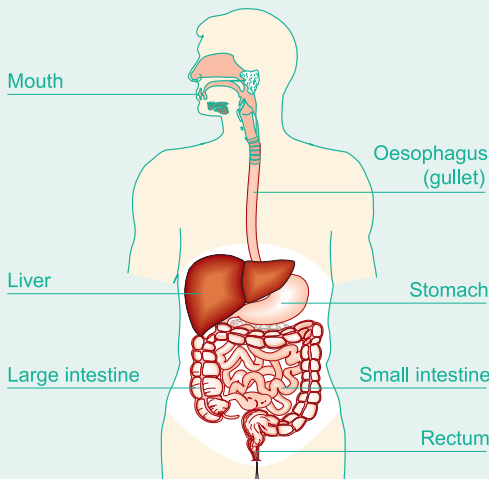

استومی

در گفتگوها و نوشته‌ها گاهی به اشتباه استومی و استوما را معادل هم به کار می‌برند اما در اصل باید یک تفاوتی بین این دو کلمه قائل شد، معمولاً به قسمتی از روده که بر سطح شکم آمده است، استوما و به عمل جراحی ایجاد مجرای خروجی بر روی شکم و قرار دادن استوما را استومی می‌گویند.

ویژگی‌های محصولات BAO- Health:

جنس کیسه‌ها:

لایه درونی کیسه‌ها، از یک فیلم مخصوص ساخته شده که مقاوم سازگار با پوست ضدبو است. همچنین دارای چندین لایه لمینت شده جهت استحکام بیشتر محصول می‌باشد. روکش کیسه روی کیسه‌ها و در تماس با پوست شکم قرار می‌گیرد از پارچه‌ی لطیفی تعبیه شده است، که ضد تعریق می‌باشد و در تماس با لباس فرد، صدای نامناسب ایجاد نمی‌کند.

فیلتر:

برخی از کیسه‌ها دارای فیلتر می‌باشند که قدرت جذب بو دارند و مدت زمان بیشتری قابل استفاده می‌باشند.

چسب کیسه:

چسب کیسه بسیار نرم و انعطاف‌پذیر است و چسبندگی مناسبی را ایجاد می‌کند با پوست سازگار بوده و خاصیت التیام‌دهندگی نیز دارد. این چسب‌ها از هیدروکلوئید مخصوصی می‌باشند که در آن‌ها از الکل و ژلاتین با منشا خوکی استفاده نشده است.

انواع کیسه ها:

کیسه یک تکه ته باز:



این کیسه ها در دو نوع بست چسبدار پرسی و بست فلزی در انتهای کیسه موجود می باشند. ماندگاری این کیسه ها تا سه روز می باشد. زمان تخلیه آن ترجیحا هنگامی باید انجام شود که $1/3$ کیسه از مواد دفعی پر شده باشد. لازم به ذکر است با توجه به سایز دهانه استومی، اندازه مورد نظر بر روی چسب پایه باید بریده شود.

کیسه کانوکس یک تکه:



این کیسه ها برای افراد استومیت که دچار عوارض شدند و کلهستومی یا ایلئوستومی آن ها، فرورفته یا همسطح پوست می باشد بکار می رود.

کیسه بعد از عمل یک تکه:



جهت مراقبت بعد از عمل جراحی و دارای دریچه معاینه

موارد مصرف:

- استومای دارای مشکل
- فیستول ها
- زخم غیر متعارف ناشی از جراحی شکم
- ویژگی ها:
- چسب پایه مقاوم در برابر ترشحات رقیق و سوزاننده
- چسبندگی مناسب

انواع کیسه ها:

کیسه یورستومی یک تکه:

جهت بیمارانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحت عمل جراحی مجرای ادرای قرار گرفتند و با ایجاد استوما نیاز به محصولی جهت جمع آوری و تخلیه ادرار دارند.

ویژگی ها:

- لمینت چند لایه پلی یورتان
- دریچه یک طرفه



لوازم جانبی:

کمر بند استومی:

بیمار دارای استوما، حتما در خصوص نحوه استفاده از کمر بند از درمانگر متخصص راهنمایی کسب کند تا با تنگ کردن بیش از حد باعث فشار بر استوما نشود.



خمیر استومی:

به دو صورت تیوپی و حلقه ایی از جنس هیدروکلئید موجود می باشد که فاقد الکل و پنتا اریتریتول استر حساسیت زا است.





Making Life Easier

نکات عمومی مراقبت از استوما:

- در هنگام حمام کردن ابتدا درجه حرارت را چک کنید تا از آسیب به استوما جلوگیری شود.
- جهت شست و شوی پوست اطراف استوما از آب و شامپوی بچه استفاده شود.
- از تیغ یا مواد شیمیایی جهت از بین بردن موهای اطراف استوما استفاده نکنید.
- بعد از استحمام پوست اطراف را کامل خشک کنید تا کیسه به خوبی به پوست بچسبد.
- یکی از مشکلات شایع در استومیت ها عوارض پوستی اطراف استوما است که با مراقبت صحیح و مشاوره درمانگر متخصص قابل پیشگیری می باشد.

در صورت مشاهده ی هر یک از علائم زیر با پزشک یا درمانگر خود تماس بگیرید:

- بروز هرگونه درد شکم در طول یک ماه پس از عمل جراحی.
- ناراحتی و التهاب در مقعد و پوست اطراف استوما.
- خونریزی شدید از استوما یا وجود خون در مدفوع.
- نشست مکرر مدفوع از چسب پایه کیسه.
- تغییر رنگ، تورم و هر گونه زخم و التهاب پوست اطراف استوما.
- بی اشتها، تهوع، درد شکمی، خواب آلودگی و ضعف عضلانی.



استوما و رژیم غذایی:

- سه وعده ی غذایی روزانه را بطور منظم میل نمایید.
- نمک، ویتامین، مواد معدنی و مکمل را زیر نظر پزشک خود مصرف نمایید.
- چهار الی شش هفته پس از عمل جراحی از خوردن مواد غذایی مانند آب، آلو، کلم و سبزیجاتی که حجم دفع را زیاد می کنند خودداری کنید.
- غذا را آهسته و کامل بجوید و در صورت امکان بعد از غذا ۳۰ دقیقه پیاده روی کنید.
- از مصرف مواد غذایی دیر هضم نظیر کاهو، قارچ، کرفس، گردو، فندق، نارگیل، خشکبار و ترشیجات پرهیز نمایید.
- در صورت امکان بعد از غذا، ۳۰ دقیقه پیاده روی کنید.
- تند غذا خوردن، استرس زیاد، بلعیدن لقمه بزرگ، نوشیدن مایعات به وسیله نی، جویدن آدامس و کشیدن سیگار، سبب افزایش دفع گاز از استوما می شود.
- مواد افزایش دهنده ی گاز دستگاه گوارش، میوه هایی مانند آلو، سیب، موز، کلم، ترب، شلغم، مارچوبه، نخود فرنگی، حبوبات و لبنیات می باشند.

لیست محصولات:

ویژگی	کد
کیسه یک تکه ته باز سایز xl، بژ با بست Velcro	1207002 F
کیسه یک تکه ته باز سایز کلاسیک، بژ با بست Velcro	1146002 F
کیسه یک تکه ته باز سایز کلاسیک، بژ با بست فلزی	1116002 F
کیسه بعد از عمل شفاف	12210204
کیسه یک تکه یورستومی	4016001
کیسه کانوکس یک تکه	1205700 FC
خمیر استومی تیوبی	6012
خمیر استومی گرد	60512
کمر بند استومی	50100





تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۵، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط) / ۸۸۷۴۸۲۹۷، فکس: ۸۸۷۴۷۱۸۹
No.128, Ghandi (Palizi) St., North Sohrevardi Ave., Tehran, Iran
Postal Code: 1554744375, Tel: (+9821) 8396, Fax: (+9821) 88747189